



Barrière universelle rabattable Termigea h23058

Barrière de lit pour personnes âgées, fabriquée en tube d'acier peint en blanc. Munie d'une fixation à pince, réglable à l'aide de molettes. Dimensions de base : 165 × 40 cm.

Barrière anti-chute universelle simple, adaptable aux lits médicalisés comme aux lits traditionnels, simples ou doubles ; structure en tube d'acier peint en blanc. La barrière est équipée d'un système de fixation à pince, réglable au moyen de deux molettes, permettant le montage sur des cadres dont le profil va de 1,8 cm à 4,5 cm. La poignée située à l'intérieur de la fente permet l'orientation vers la tête ou les pieds du patient et offre en outre la possibilité de rabattre complètement la barrière sans devoir la démonter.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : tube d'acier peint en blanc Ø 2,54 cm
- Basculement à 180 °
- Orientation vers la tête ou les pieds du patient à l'aide de molettes
- Dimensions de la base : 165 × 40 cm
- Poids : 6,8 kg
- Conforme aux exigences essentielles de l'annexe I de la directive 93/42/CEE, telle que modifiée par la directive 2007/47/CE, comme prescrit par l'annexe VII de la directive 93/42/CEE et ses amendements ultérieurs

Installation et utilisation

Commencez par retirer les vis à bouton moleté situées à la base des pinces, puis ajustez les autres vis en fonction de la structure du lit. Placez ensuite la barrière, avec ses deux pinces, sur le cadre du lit et remettez les vis que vous aviez retirées. Réglez la position de la barrière par rapport au lit et serrez uniformément les boutons moletés des pinces.

Les boutons moletés de basculement et d'orientation, une fois desserrés, permettent de déplacer la barrière vers la tête ou les pieds du patient dans la plage offerte par les fentes ; après réglage, resserrez-les. Si ces boutons sont desserrés jusqu'à libérer complètement les fentes, la barrière peut pivoter à 180 °, facilitant toute manœuvre sur le lit ou auprès du patient. Lorsque vous avez terminé, remettez la barrière en position et resserrez les boutons moletés.

INFORMATIONS

- **garantie 1 an**