



Fauteuil roulant de douche confortable en aluminium h8914

Fauteuil roulant de douche avec châssis en aluminium blanc anticorrosion avec 4 roues de 5 pouces.

Siège souple de 45 cm de large.

Capacité de charge 150 kg.

Fauteuil roulant de douche idéal pour prendre une douche en position assise pour toutes les personnes à mobilité extrêmement réduite. Le châssis en aluminium anticorrosion garantit la durabilité et l'assise, le dossier et les repose-pieds en polyuréthane souple préviennent les escarres.

Il est équipé de 4 roulettes de 5 pouces dotées de freins et d'un seau de toilette avec couvercle, ce qui permet de l'utiliser à la fois comme fauteuil de douche et comme toilette. Les repose-pieds sont amovibles et réglables et la hauteur de l'assise est réglable.

Fiche technique :

- cadre en aluminium traité blanc
- 4 roues de 5 pouces avec freins
- siège, dossier et repose-pieds en polyuréthane souple
- repose-pieds amovibles et réglables
- largeur d'assise 45 cm
- profondeur d'assise 43 cm
- hauteur d'assise 50 - 55 cm réglable
- hauteur maximale franchissable (WC) 42 - 47 cm réglable
- largeur totale (avec accoudoirs) 56 cm
- profondeur totale 93 cm
- hauteur totale 96 - 101 cm réglable
- capacité max. 150 kg

- poids 12,90 kg
- marquage CE (conforme à la directive 93/42/CEE du 14 juin 1993, annexe I, relative aux dispositifs médicaux)
- garantie 2 ans

Inclinaison de l'accoudoir:

- cette fonction peut faciliter l'entrée et la sortie de l'utilisateur du fauteuil roulant
- lors de la douche, le fait de rabattre les accoudoirs améliore également l'hygiène personnelle pendant l'utilisation, ne jamais laisser le fauteuil roulant sans surveillance lorsque les accoudoirs sont rabattus
- pour rabattre les accoudoirs, les soulever vers l'avant
- pour repositionner les accoudoirs, les rabattre vers l'avant en appuyant sur la partie frontale

Réglage des repose-pieds à la hauteur souhaitée

- la hauteur des repose-pieds du fauteuil roulant doit être adaptée à l'utilisateur
- la hauteur est correctement réglée si, lorsque l'utilisateur est assis, ses cuisses reposent correctement sur le siège et ses pieds sur les repose-pieds
- pour régler la hauteur des repose-pieds, il faut les retirer du fauteuil roulant
- retirer la vis de fixation régler la hauteur des repose-pieds en insérant ou en retirant la chambre à air
- insérer et serrer la vis de fixation

Réglage de la hauteur du siège:

- la hauteur d'assise doit être adaptée à l'utilisateur et est correctement réglée si l'utilisateur assis repose régulièrement ses pieds sur le sol
- régler la hauteur d'assise uniquement lorsque le fauteuil roulant est vide
- pour le réglage de la hauteur, saisissez le clip et tirez-le vers l'extérieur
- régler le tube télescopique à la hauteur souhaitée
- insérer le clip dans le trou prévu à cet effet
- réglez toujours tous les tubes télescopiques à la même hauteur
- n'effectuez aucun réglage lorsque le fauteuil roulant est en cours d'utilisation !

INFORMATIONS

- **Hauteur** réglable
- **largeur** 56 cm
- **profondeur** 93 cm
- **Capacité MAX** 130 Kg
- **Matériau** aluminium

Fauteuil roulant de douche confortable en aluminium h8914



Fauteuil roulant de douche confortable en aluminium h8914

Hauteur: réglable

Largeur: 56 cm

Profondeur: 93 cm

Capacité MAX: 150 g

Matériau: aluminium