



Siège de baignoire pivotant en aluminium h8901

Fauteuil de bain pivotant avec structure en aluminium, assise et dossier souples. Dimensions : L 71 x P 54 x H 57 cm

La chaise pivotante h8901 convient à la plupart des baignoires standard. La rotation du siège et la possibilité de retirer les accoudoirs permettent à l'utilisateur d'entrer et de sortir confortablement de la baignoire. La chaise se compose de 2 parties : la base, qui doit être positionnée et verrouillée sur la baignoire, et le siège, qui peut tourner à 360° sur la base (avec 4 positions d'arrêt).

Caractéristiques techniques :

- structure en aluminium peint
- assise et dossier en PUR souple gris
- Siège 41 x 34 cm avec plateau hygiénique
- Hauteur 20 cm, dossier : 38 cm
- Convient aux baignoires de 57 à 66 cm (largeur intérieure)
- Hauteur totale : 57 cm
- Longueur : 71 cm
- Profondeur : 54 cm
- Poids 4,88 kg
- Capacité de charge 130 kg

Fonctionnement

- Placez le cadre sur la baignoire, en veillant à ce que les 4 embouts reposent parfaitement sur le bord de la baignoire. Pour éviter tout mouvement latéral du cadre, fixez les vis de verrouillage de manière à ce qu'elles s'enfoncent dans le bord de la baignoire et s'y verrouillent.
- Veillez à ce que le siège puisse tourner librement. Si nécessaire, il est possible de déplacer le siège latéralement sur le cadre (3 positions). Pour ce faire, dévissez le bouton étoile et déplacez le siège latéralement jusqu'à la position la plus appropriée, puis fixez à nouveau le siège sur le châssis en vissant le bouton étoile.
- tourner le siège en biais vers le bord de la baignoire jusqu'à ce que le levier de verrouillage s'arrête
- s'asseoir sur le siège en tenant les accoudoirs des deux mains. Si nécessaire, les accoudoirs peuvent être facilement retirés pour une entrée/sortie plus confortable.

INFORMATIONS

- **Hauteur** 57 cm
- **profondeur** 54 cm
- **Matériau** aluminium

- **Longueur** 71 cm
- **utilisation** bain