



Siège de transfert pour baignoire h8903

Siège de transfert pour baignoire avec cadre en aluminium et siège en plastique. Hauteur réglable de 89,6 à 99,5 cm, largeur 107 à 111 cm, profondeur 49 à 53 cm.

Vous cherchez un moyen sûr de vous immerger dans la baignoire ? Le siège de transfert pour baignoire h8903 facilite l'entrée et la sortie de la baignoire. Il se compose d'un cadre en aluminium, d'un siège, d'un dossier et d'un porte-savon en plastique blanc. Le siège est réglable en hauteur. Le siège repose sur des roulettes pour faciliter le transfert latéral de l'utilisateur vers et depuis la baignoire

Caractéristiques techniques

- châssis en aluminium avec pieds verrouillables et réglables en hauteur
- siège et dossier en plastique blanc
- poignée de sécurité rouge
- 2 écrous à oreilles rouges pour la fixation de la poignée
- porte-savon en plastique
- largeur 107 - 111 cm
- profondeur 49 - 53 cm
- hauteur totale réglable de 89,5 à 99,5 cm
- largeur du siège 50 cm (avec poignée)
- profondeur du siège 39,5 cm
- hauteur du siège réglable de 45,5 à 55,5 cm
- poids 6,50 kg
- capacité de charge maximale 130 kg

Ce produit ne peut être utilisé que sur des baignoires d'une hauteur maximale de 55,5 cm.

Fonctionnement

- positionner le siège de transfert de manière à ce que deux des pieds du siège reposent sur le fond de la baignoire et deux sur le sol à l'extérieur
- s'asseoir sur le siège et actionner le levier rouge situé sous le siège et le maintenir ouvert ; cela permet de débloquer le système de verrouillage pour le mouvement latéral
- pousser le siège en direction de la baignoire, en utilisant les pieds et en déplaçant le poids du corps

- dès que le siège a atteint la fin de sa course, relâchez le levier pour verrouiller le siège. Si le siège ne se verrouille pas, déplacez-le légèrement vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le système de verrouillage s'enclenche avec un "clic" audible.
- pour sortir de la baignoire, répétez ces étapes dans l'ordre inverse

INFORMATIONS

- **Hauteur** 89,6 cm
- **profondeur** 49 cm
- **Capacité MAX** 130 Kg
- **Matériau** aluminium
- **Longueur** 107 cm
- **utilisation** bain

Siège de transfert pour baignoire h8903



Siège de transfert pour baignoire h8903

Hauteur: 89,6 cm

Profondeur: 49 cm

Capacité MAX: 130 kg

Matériau: aluminium

Longueur: 107 cm

Utilisation: vasca da bagno